

Cómo Cargar un Dispensador de Cubrecalzados Bootie Butler®

ICP Medical®
by Cordica Medical



La característica patentada “Fácil de Cargar” de Bootie Butler deja que los paquetes de cubrecalzados sean cargados en el dispensador. No hay que usar ninguna herramienta para ajustar las vías.



Para instalar los cubrecalzados, quite la bolsa de plástico del paquete, dejando intacta la cinta atada. La flecha en el lomo debe señalar hacia abajo.



Alinee las “pinzas” azules con las ranuras de las vías auto ajustes. Asegure que **TODAS LAS PINZAS** entren en las ranuras y que las puntas redondeadas se mantengan en la parte exterior de la vía (como se ve en la foto).



Para dejar que las pinzas entren fácilmente en las vías, empuje hacia abajo y hacia adelante, manteniendo el paquete a un ángulo de 90 grados. Utilice dos manos para que las pinzas se metan en las vías.



Empuje el paquete en la máquina hasta una distancia de 3-4 pulgadas **DEBAJO** de la parte más alta de las vías. Desate y quite la cinta amarilla y el lomo de cartón.



Ponga una mano en la parte superior del paquete mientras presionando los cubrecalzados. Saque las anillas anaranjadas, jalándolas hacia arriba y hacia afuera.

Cómo Cargar un Dispensador de Cubrecalzados Bootie Butler®


ICP Medical®
by Cordica Medical



Empuje el paquete hacia abajo hasta que el paquete se detenga en la parte inferior de la “lengua” de resistencia. (Carga 1 paquete)



Para preparar el dispensador, mire el frente y saque la parte delantera del cubrecalzado expuesto. Luego, con el dedo índice y el meñique, jale suavemente hasta que el primer cubrecalzado “cierre” en su sitio en las asas en cada lado del dispensador.

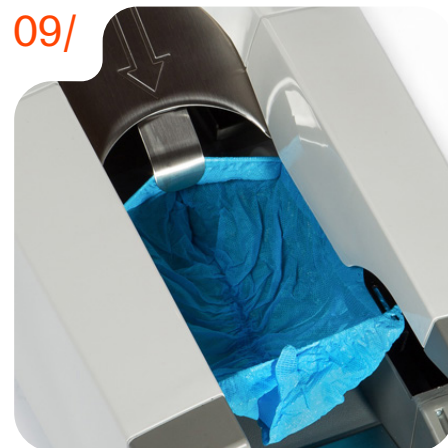

¡Adecuadamente cargado y listo para usar!



Instalación del Mango:

Inserte el mango del quitador en la parte superior del Dispensador.

Alinee los 4 tornillos del mango con los agujeros correspondientes de la Unidad Dispensadora.

Note: Esta foto muestra la unidad por detrás.